

Legga con attenzione queste istruzioni per l'uso: contengono importanti informazioni sull'uso del prodotto. Per eventuali domande si rivolga al contattologo, al farmacista, al medico o direttamente a noi.

# Bio true®

## Soluzione oftalmica

### Ispirata dalla biologia dei tuoi occhi

0,24 % ialuronato di sodio, sodio cloruro, potassio cloruro, disodio fosfato dodecaidrato, sodio diidrogeno fosfato-diidrato e acqua per preparazioni iniettabili.

**Uso previsto:** idratare oculare e umettante; utile anche per reidratare le lenti a contatto morbide e rigide durante l'uso.

**Che cos'è Biotrue® Soluzione oftalmica?** Biotrue® Soluzione oftalmica è una soluzione oculare limpida contenente 0,24% di acido ialuronico (sotto forma di ialuronato di sodio) ed alcuni eccipienti. La formulazione ha una tollerabilità molto alta dato che è priva di conservanti. Dopo l'apertura, il prodotto può essere usato per 6 mesi.

**A cosa serve Biotrue® Soluzione oftalmica?** Biotrue® Soluzione oftalmica è il nostro prodotto di prima scelta per lenire e idratare immediatamente gli occhi secchi. Rinfresca e calma gli occhi secchi in modo naturale e allevia i sintomi dovuti agli occhi stanchi, affaticati e che lacrimano. Biotrue® Soluzione oftalmica è utile per umettare e idratare le lenti a contatto morbide e rigide durante l'uso, migliorandone notevolmente il comfort per tutto il giorno.



**Quando usare Biotrue® Soluzione oftalmica?** Biotrue® Soluzione oftalmica contiene l'umettante naturale acido ialuronico (sotto forma di ialuronato di sodio), che è presente nelle strutture dell'occhio umano sano e nel film lacrimale naturale. La formula di Biotrue® Soluzione oftalmica consente al prodotto di rimanere sulla superficie oculare, conferendo un effetto umettante immediato contro tutti i sintomi di occhio secco. È un prodotto ideale per tutti coloro che soffrono di sintomi dovuti agli occhi secchi, come stanchezza, affaticamento, bruciore e/o lacrimazione.

L'occhio secco può essere causato da:



- fattori esterni, come uso prolungato del computer, aria condizionata o riscaldamento, fumo di sigaretta, così come ambienti ventosi oppure l'uso di lenti a contatto;
- altri fattori, quali l'uso di alcuni farmaci (come contraccettivi, antistaminici, betabloccanti, antispastici e diuretici) o alcune malattie che giocano un ruolo importante nello sviluppo della secchezza oculare.

**Con che frequenza e per quanto tempo usare Biotrue® Soluzione oftalmica?** Instillare una goccia di Biotrue® Soluzione oftalmica nell'occhio secondo necessità. Il prodotto può essere utilizzato tutti i giorni e tutte le volte che si desidera. Può essere usato anche per periodi di tempo prolungati.

**Come usare Biotrue® Soluzione oftalmica? Attenzione! Prima del primo utilizzo e qualora il flacone non sia stato usato per qualche tempo:** togliere il cappuccio e, puntando il flacone verso il basso, premere ripetutamente per circa 20 volte fino a far cadere una goccia. Ora il flacone è pronto per l'uso.

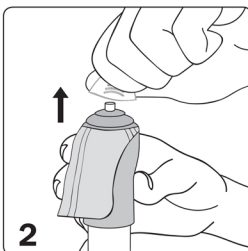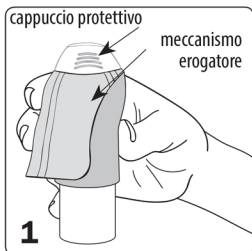

1. Lavarsi le mani prima di utilizzare il prodotto e tenere il flacone come indicato in figura.
2. Togliere il cappuccio protettivo dalla testa del flacone prima di ogni utilizzo. Evitare di toccare la punta del flacone con le dita o con qualsiasi altra superficie, al fine di prevenire una possibile contaminazione della soluzione.

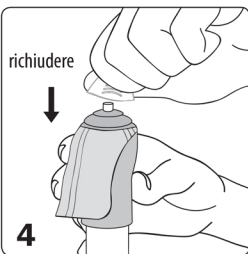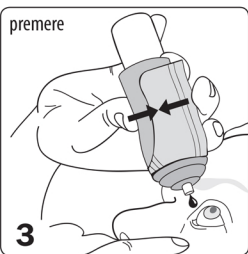

**3.** Inclinare leggermente all'indietro la testa. Con un dito della mano libera, abbassare delicatamente la palpebra inferiore; tenere il flacone in posizione verticale sopra l'occhio e premere il meccanismo erogatore per applicare una goccia nell'occhio. Evitare di toccare la superficie dell'occhio con la punta del flacone per prevenire possibili lesioni. Quindi chiudere l'occhio e muoverlo lentamente per facilitare una distribuzione

ottimale della goccia sulla superficie dell'occhio.

**4.** Immediatamente dopo l'uso, scuotere il flacone per eliminare possibili gocce residue e applicare nuovamente il cappuccio protettivo sulla punta asciutta del flacone. L'innovativo meccanismo erogatore di Biotrue® consente di mantenere la soluzione senza conservanti e permette un'instillazione confortevole.

Il volume scritto sull'etichetta è quello che verrà rilasciato. Per permettere il corretto funzionamento dell'erogatore, nel flacone è stata inserita una quantità maggiore di prodotto.

**Quando non si può usare Biotrue® Soluzione oftalmica?** Non usi il prodotto se è ipersensibile a uno qualsiasi dei componenti.

**Informazioni importanti sull'uso di Biotrue® Soluzione oftalmica**

- Sono state segnalate molto raramente reazioni di ipersensibilità locale. In questi casi, il trattamento deve essere sospeso.
- Informazioni di sicurezza per i pazienti con danni gravi alla cornea: in casi molto rari sono stati segnalati depositi di fosfato di calcio sulla cornea durante il trattamento con prodotti per uso oftalmico contenenti fosfati.
- Evitare il contatto della punta del flacone con la superficie dell'occhio per prevenire possibili lesioni della superficie dell'occhio o la contaminazione della soluzione.
- Dopo l'uso, eliminare possibili gocce residue dalla punta del flacone.
- Attendere circa 15 minuti prima di usare un altro prodotto oculare.
- Una volta aperto, gettare il dispositivo medico dopo 6 mesi.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non usare se la confezione o il flacone sono danneggiati.

**Come conservare Biotrue® Soluzione oftalmica?** Conservare a una temperatura tra +1 e +25°C. Il design del flacone consente di usare Biotrue® Soluzione oftalmica per 6 mesi dopo l'apertura.

CE 0483

 Dr. Gerhard Mann  
chem.-pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlino, Germania

Distributore in Italia:  
Bausch & Lomb - IOM S.p.A.  
Viale Martesana, 12 - 20090  
Vimodrone (MI)



Limiti di temperatura



Non utilizzare se la confezione è danneggiata



Seguire le istruzioni per l'uso



Data di scadenza



Smaltire il dispositivo medico dopo 6 mesi dall'apertura.



Numero di lotto



Sterile grazie all'uso di tecnologie asettiche



Fabbricante

**Biotrue® Soluzione Oftalmica**, data di revisione del testo: Settembre 2017

®/™ sono marchi di Bausch & Lomb Incorporated o delle sue affiliate

© Bausch & Lomb Incorporated